

AED Wandkasten Alarmsystem

Kurzanleitung Batteriewechsel

Alarm

Der Alarm wird durch das Öffnen der Wandkastentür ausgelöst, sofern das Gerät eingeschaltet und das Schloss auf „on“ gedreht ist.

	<p>Batteriebetrieb</p> <p>Gemäss Hersteller hält die 9V-Batterie im Stand-by-Modus (Schalter auf Alarm, gemäss Abbildung) ca. 2 Jahren. Aus Sicherheitsgründen wechseln Sie die Batterie bitte nach 6 Monaten.</p>
	<p>Batteriewechsel (Version 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lösen Sie die Kreuzschrauben an dem roten Alarm oben links im Wandkasten. 2. Schieben Sie den Batteriedeckel gemäss gravierten Pfeilen nach Links. 3. Ersetzen Sie die 9V Blockbatterie 4. Batteriedeckel von Links einschieben und mit der Schraube befestigen.
	<p>Batteriewechsel (Version 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lösen Sie die 2 Kreuzschrauben an dem roten Alarm oben links im Wandkasten. 2. Entfernen Sie den Batteriedeckel 3. Ersetzen Sie die 9V Blockbatterie. 4. Batteriedeckel wieder anbringen und festschrauben.