

# CompactCase

## Indoor AED-Wandkasten

### Einsatzbereich

Geeignet für den Indoor-Bereich für folgende AEDs:

**ZOLL AED 3**  
ohne Tasche



**ZOLL AED Plus**  
mit oder ohne Tasche



**Mindray BeneHeart C1A**  
ohne Tasche




**Mindray BeneHeart C2**  
ohne Tasche



### Spezifikationen

- Gewicht: 3.8 kg
- Material: Stahl
- Türgriff: Aluminium
- ILCOR AED-Herz auf beiden Seiten
- Farbe: Weiss / grün (matt)
- Sichtfenster: Acrylglas

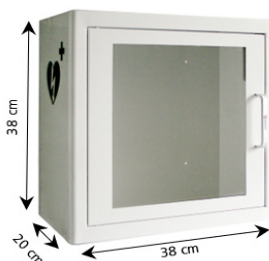

### Ausführungen & Lieferumfang

CompactCase weiss	Mit Alarm	Bestell-Nr. 60.112
CompactCase weiss light	Ohne Alarm	Bestell-Nr. 60.111
CompactCase grün	Mit Alarm	Bestell-Nr. 60.122
CompactCase grün light	Ohne Alarm	Bestell-Nr. 60.121
Alarmmodul	Nachrüstbar bei CompactCase light	Bestell-Nr. 69311

#### Lieferumfang

- 1 x CompactCase (mit Alarmmodul) oder CompactCase light (ohne Alarmmodul)
- 1 x Türgriff mit Schrauben
- 4 x Schrauben, Dübel und Unterlagscheiben für Montage

### Optionales Alarmmodul

Akustischer Alarm zur Alarmierung der unmittelbaren Umgebung. Alarm wird durch Öffnen der Türe ausgelöst und beim Schliessen wieder beendet. Zudem kann das Alarmmodul separat ein- und ausgeschaltet werden. Das Alarmmodul ist beim CompactCase light jederzeit nachrüstbar.

#### Spezifikationen Alarmmodul

- Batterien: 3 Stk. Typ AG13
- Haltbarkeit Batterien: ca. 2 Jahre
- Lautstärke: 90 dB

# CompactCase


## Montageanleitung

### Montageanleitung CompactCase

#### Lieferumfang kontrollieren

1. CompactCase
2. 4x Befestigungsschrauben
3. 4x Dübel
4. 4x Unterlagscheibe
5. 1x Metallischer Türgriff
6. 2x Schrauben zu Türgriff

# 1

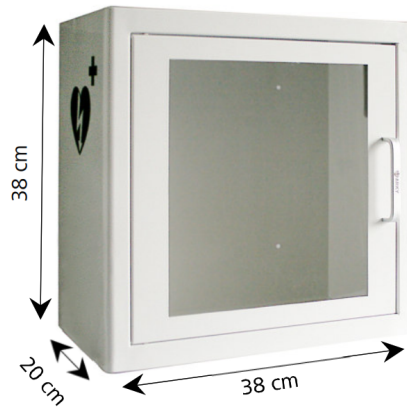

#### Türe vorbereiten

1. Türe an vormontierter Schnur öffnen
2. Schnur abschneiden
3. Türgriff mit den beiden Schrauben fixieren


# 2



#### Montage CompactCase

1. CompactCase auf einer gut sichtbaren Höhe platzieren (Richtwert 1.3m ab Boden) und die vier Löcher anzeichnen
2. Vier Löcher für die Dübel bohren
3. CompactCase montieren

# 3

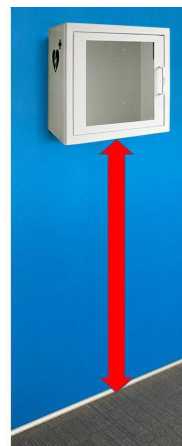

# Montageanleitung Alarmmodul

## CompactCase

### Montage Alarmmodul



1. Das Alarmmodul besteht aus dem eigentlichen Alarm sowie einem Magneten. Beide Teile sind mit einem Klebestreifen versehen für die Montage.

#### Batterieinformationen

Batterietyp: AG13


Anzahl: 3 Stk.

Laufzeit: ca. 2 Jahre



2. Schutzfolie vom Klebeband auf der Rückseite des Alarms entfernen. Alarm in der oberen rechten Ecke des Schrankes mit dem EIN-/AUS-Schalter nach rechts (siehe Foto) platzieren. Sicherstellen, dass der Alarm möglichst links am Rahmenrand zu liegen kommt, damit genügend Platz für die Bedienung des Schalters vorhanden ist.

Anschliessend den Alarm für 10 Sekunden gegen den Schrank drücken für optimale Haftung.

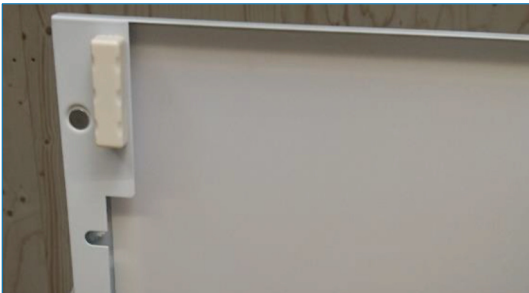

3. Der Abstand zwischen Alarm und Magnet darf nicht mehr als 10 mm betragen. Den Magneten so nah wie möglich am Alarm montieren und 10 Sekunden gedrückt halten für optimale Haftung.



4. Das Alarmmodul auf «EIN» schalten, um den Alarm zu testen. Anschliessend die Türe schliessen, so dass sich der Alarm automatisch ausschaltet.