


Spritzenpumpe – Kurzanleitung


Sperren des Touchscreens


Zum Sperren des Touchscreens wischen Sie von oben nach unten über den Touchscreen, und wählen Sie .

Entsperren des Touchscreens

Zum Entsperren des Touchscreens drücken Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Touchscreen, und schieben Sie den Schieberegler wie angewiesen.

Spritze einsetzen

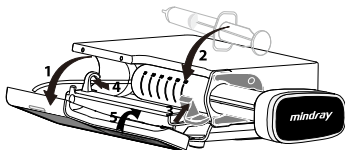




1. Drücken Sie den Betriebsschalter , um die Pumpe einzuschalten.
2. Ziehen Sie die Klappe (1) auf, und ziehen Sie die Spritzenklemme nach unten.
3. Setzen Sie die Spritze in den Spritzeneinschub (2) ein. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Zylinderflansch im Raum zwischen der Pumpe und der Spritzenflanschklammer befindet.
4. Heben Sie die Spritzenklemme an, bis sie am Spritzenzylinder (3) einrastet.
5. Legen Sie die Verlängerungsleitung in den Haken für das Verlängerungsset (4).
6. Schließen Sie die Pumpenklappe (5).

WARNUNG: Überprüfen Sie, ob die Spritze und die Verlängerungsleitung fest angeschlossen sind und keine Leckagen aufweisen.

Durchführen der Infusion

Führen Sie nach dem Einsetzen einer Spritze die Infusion gemäß den folgenden Anweisungen durch:

1. Wählen Sie die Spritzenmarke aus, und stellen Sie die Infusionsparameter ein. Wählen Sie bei Bedarf das Medikament aus.
2. Spülen Sie die Infusionsleitung, und schließen Sie die Verlängerungsleitung am Patienten an.
3. Wählen Sie , um die Infusion zu starten.
4. Wählen Sie , um die Infusion zu stoppen.
5. Entnehmen Sie die Spritze. Drücken Sie den Betriebsschalter , um die Pumpe auszuschalten.

WARNUNG: Überprüfen Sie vor Beginn der Infusion, ob die richtige Spritzenmarke ausgewählt wurde.

Einstellen der Pumpe

Um die Pumpe einzustellen, wischen Sie auf dem Touchscreen von oben nach unten, und wählen Sie **Menu**.

- ◆ Wählen Sie **Allg. Option**, um den Schwellenwert für den Okklusionsdruck usw. einzustellen.
- ◆ Wählen Sie **Systemoptionen**, um die Alarmlautstärke, Bildschirmhelligkeit usw. einzustellen.

Alarmstatus-Symbole



: Akustische Alarmtöne sind auf „Pause“ gesetzt.





: Alarme wurden quittiert, und der Alarm wurde zurückgesetzt.




: Alarme wurden quittiert, und der Erinnerungston wurde ausgegeben.

Pausieren von Alarmtönen

Um in den Status „Audio-Pause“ zu wechseln, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- ◆ Wählen Sie  auf dem Alarmbildschirm.
- ◆ Wischen Sie von oben nach unten über den Touchscreen, und wählen Sie .

Zurücksetzen von Alarmen

Wenn ein Alarm auftritt, drücken Sie , um ihn zu quittieren und zurückzusetzen.

Maßnahmen bei Alarmen

Alarm	Was ist zu tun?
Okklusion	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Überprüfen Sie, ob die Schläuche geknickt oder beschädigt sind. ◆ Überprüfen Sie die Einstellung für den Druckgrenzwert. Erhöhen Sie ggf. den Schwellenwert.
Spritze gelöst	Setzen Sie die Spritze neu ein.
Kolben-Greifer-Fehler	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stellen Sie sicher, dass die Kolbengreifer nicht blockiert sind. ◆ Öffnen oder schließen Sie die Kolbengreifer manuell. ◆ Falls der Alarm weiterhin ausgelöst wird, wenden Sie sich an das Wartungspersonal.
Verläng.kabel entfernt	Überprüfen Sie das Verlängerungsset, und schließen Sie es wieder an.

WARNUNG: Überprüfen Sie beim Auftreten eines Alarms den Status der Pumpe, und gehen Sie dem Alarm so schnell wie möglich nach. Wenn die Alarme nicht mit der tatsächlichen Situation übereinstimmen, wenden Sie sich an das Wartungspersonal. Maßnahmen für andere Alarme finden Sie im Bedienungshandbuch.



046-021140-00(1.0)