






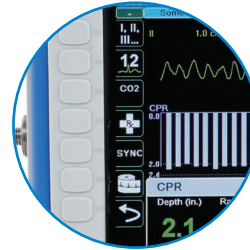


X Series®

Konfiguration für Transfer von Betriebsprotokollen

1. Drücken Sie im Hauptanzeigefenster die Schnellzugriffstaste **Mehr** 
2. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Einstellungen** 
3. Navigieren Sie mit  und  zum Punkt **Supervisor** und bestätigen mit 
4. Geben Sie den 4-stelligen Passcode (xxxx) ein
5. Navigieren Sie mit  und  zum Punkt **Kommunikation** -> **Betriebsprotokoll** und bestätigen mit 
6. Geben Sie folgende Zugangsdaten ein:

Server - DNS - Name: xxxxx
Schnittstelle: 443
Kennwort: xxxxx
Kunden-ID: xxxxx
Zertifikat validieren: Inaktiv




Server DNS Name	<input type="text"/>
Port	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>
Customer ID	<input type="text"/>
Verify Certificate	<input type="text"/>





X Series®

Versenden von Betriebsprotokollen


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit WLAN oder einem Modem verbunden ist.

2. Drücken Sie im Hauptanzeigefenster die Schnellzugriffstaste **Mehr** 




3. Drücken Sie die Schnellzugriffstaste **Prot** 

4. Drücken Sie dann die Schnellzugriffstaste **Betriebsprotokollübertragung** 






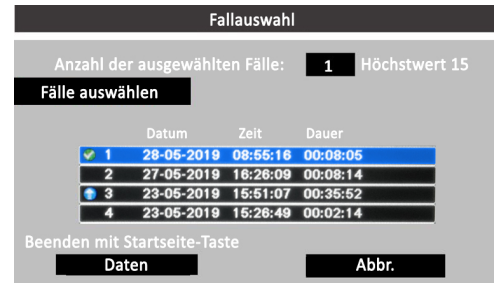
5. Das Dialogfeld **aktuellen Fall schließen?** wird angezeigt. Die Option **Fall schliessen** wird hervorgehoben. Drücken Sie die **Auswahlstaste**  um den Fall zu schliessen.

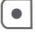

6. Das Dialogfeld **Fallauswahl** wird mit einer Liste von bis zu 150 letzten Fällen angezeigt. Wählen Sie mithilfe der **Navigationstasten**  und  **Fälle auswählen** aus und drücken Sie die **Auswahlstaste** . Die Fälle können jetzt für den Datentransfer ausgewählt werden.



7. Wählen Sie die Fälle für die Übertragung aus, indem Sie jeden Fall zunächst mithilfe der **Navigationstasten**  und  markieren und dann die **Auswahlstaste**  drücken. Ein Fall ist für die Aufnahme in die Betriebsprotokollübertragung ausgewählt, wenn am Anfang des Eintrags ein grünes Häkchen angezeigt wird.



8. Drücken Sie die Taste **Anzeige/Startseite** . Die Hervorhebung wechselt zur Taste **Senden**. Drücken Sie die **Auswahlstaste**  um die Datenübertragung zu starten. Wenn das Dialogfeld „Betriebsprotokollübertrag. – Abgeschl.“ angezeigt wird, wählen Sie **OK** aus, um zum Hauptanzeigefenster zurückzukehren.



Die grüne LED oben am Gerät leuchtet, während die Daten übertragen werden.

Hinweis: Das Drucken und Protokollieren von Snapshots ist während der Protokollübertragung deaktiviert.