


Brayden Reanimationspuppen - Beatmung

Hygienehinweise

Brayden Erwachsene & Junior Umbaukit

Die Brayden Erwachsene und Junior sind für das Beatmen mittels Beatmungsbeutel sowie Mund-zu-Mund konzipiert. Bei der Mund-zu-Mund Beatmung empfiehlt der Hersteller die Verwendung einer Beatmungsfolie oder Beatmungsmaske. Nach Mund-zu-Mund Beatmungen wird der Austausch von Lunge, Filter und Rückschlagventil empfohlen.

Die ausströmende Luft entweicht zum einen über das untere Ende der Lunge und zum anderen über den Unterkiefer der Puppe. Ein Rückschlagventil verhindert das Ausströmen über Mund und Nase.

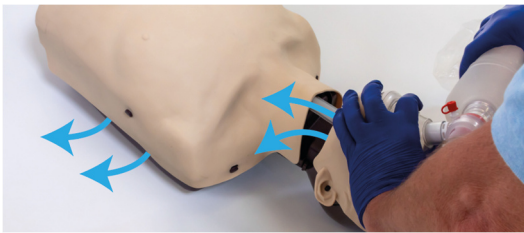

Visualisierung Luftaustritt Brayden Erwachsener/Junior



Rückschlagventil



Filter




Lunge

Videoanleitung Wechsel Verbrauchsmaterial: <https://youtu.be/Bjlbj8mTAYk>

Brayden Baby

Gemäss Hersteller ist das Brayden Baby für die Beatmung mit Beatmungsbeutel gedacht. Falls trotzdem Mund zu Mund/Nase beatmet werden sollte, wird die Verwendung einer Beatmungsfolie oder Beatmungsmaske empfohlen mit anschliessendem Austausch des Filters. Die Lunge muss nicht ausgewechselt werden.

Die ausströmende Luft entweicht zwischen Oberkörperabdeckung und Rücken. Ein Rückschlagventil verhindert das Ausströmen über Mund und Nase.

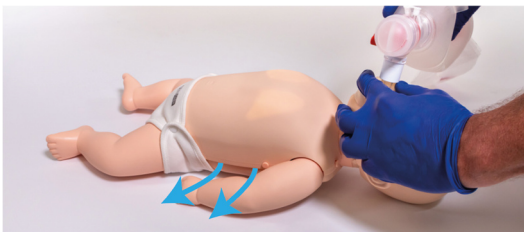

Visualisierung Luftaustritt Brayden Baby



Filter

Videoanleitung Wechsel Verbrauchsmaterial: <https://youtu.be/a8LiWJz7BXY>

Reinigung

Gesichtsmaske und Oberkörperabdeckung und können z.B. im Geschirrspüler gereinigt werden (max. 60°C).

Für die Desinfektion der Gesichtsteile und Oberkörperabdeckung empfiehlt der Hersteller folgende Desinfektionsmittel:

- Bacillol® 30 Foam - Aldehydfreies, alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel
- Bacillol® AF - Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel
- Dismozon® plus - Sauerstoffaktives Flächen-Desinfektionsreiniger-Granulat
- Bomix® plus - Aldehydfreies Instrumenten-Desinfektionsmittel
- Kohrsolin® extra - Aldehydhaltiger Flächen-Desinfektionsreiniger
- Korsolox® basic - Aldehydisches Desinfektionsmittel

Detailliertere Informationen unter:

<http://www.procamed.ch/downloads> → Reanimationspuppen → Brayden Manikin – LED → «Brayden Reinigungsempfehlung»