


TME quadripolar

Temporäre Myokard-Elektrode (Herzdraht)

Temporary Myocardial-Lead (Heartwire)

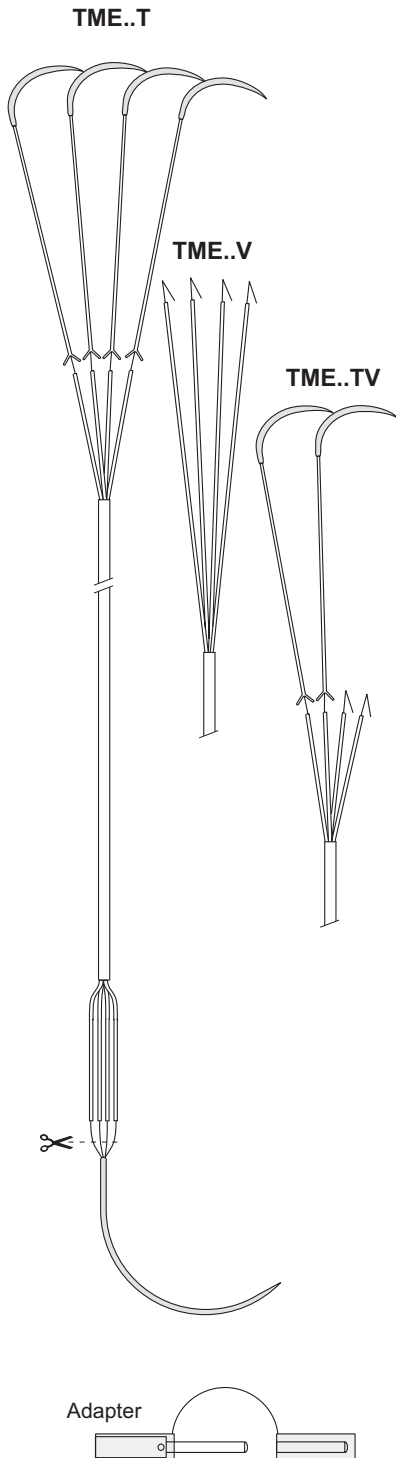

Artikelbeschreibung

Vierpolige TME werden zur optimalen Therapie post-operativer Herzrhythmusstörungen eingesetzt.
Die Verankerung im Myokard erfolgt durch Anker/Tines (Typ:TME..T).
TME mit V-Verankerung (Typ: TME..V) werden zur atraumatischen Fixierung (mittels chirurgischem Nahtmaterial) für die atriale Stimulation eingesetzt.
TME können per Adapter direkt am externen Herzschrittmacher angeschlossen werden, wozu die Thoraxnadel abgeschnitten und die frei-liegenden Drahtenden an den Adaptern fixiert werden.

Anzahl der Pole: vierpolig
Länge:.....60 cm / 220 cm
Drahtmaterial:Edelstahl
Isolierung:..... Polyethylen
Außendurchmesser Isolierung:.....4x 0,45 mm
Farbe: blau / weiß
Schutzschlauch:..... Polyethylen
Schutzschlauchdurchmesser:..... 1,50 mm
Herznadel:gebogen
Thoraxnadel:.....gebogen
Elektroden:
Litzendurchmesser:0,20 mm
Oberfläche:.....4x 6 mm² (TME..T, TME..TV, TME..V)

Lieferumfang: - 1 vierpoliger Herzdraht
- 4 Adapter
2x weiß + 2x blau (2mm Pin)

Product Description

Quadripolar TME are used for optimal therapy of postoperative cardiac dysrhythmia.
Fixation in the myocardium is by tines (type:TME..T).
Heartwires with a V-fixation (type: TME..V) are used for atraumatic fixation (with the help of suture material) in atrial stimulation.
TME can directly be connected to an external pacemaker by cutting off the thoracic needle and fixing the non insulated ends of the wires to the adapters.

Number of poles:quadripolar
Length:60 cm / 220 cm
Material of wire:.....stainless steel
Insulation:..... Polyethylene
Outer diameter of insulation:.....4x 0.45 mm
Color: blue / white
Protective tubing:..... Polyethylene
Protective tubing diameter:.....1,50 mm
Heart needle:.....curved
Thoracic needle:.....curved
Electrodes:
Diameter of wire:0.20 mm
Surface area: 4x 6 mm² (TME..T, TME..TV, TME..V)

Delivery volume: - 1 quadripolar heartwire
- 4 adapters
2x white+2x blue (2mm pin)

Artikelbezeichnung Product Name

Artikel-Nr. Article-no.

Stück Unit

TME..T (quadripolar)

TME4-68T 60 cm 47005-01 25
TME4-68T 220 cm 45046-01 25

TME..V (quadripolar)

TME4-68V 60 cm 45049 25

TME..TV (quadripolar)

TME4-68TV 60 cm 45051-01 25
TME4-68TV 220 cm 45052-01 25

Die Lieferung erfolgt gas-sterilisiert.
Für Einmalgebrauch bestimmt!
Goods supplied gas-sterilized.
For one time use only!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
The right to make technical improvements without notice is reserved.